


# O2MATIC QUICK GUIDE

Kom hurtigt i gang med O2matic

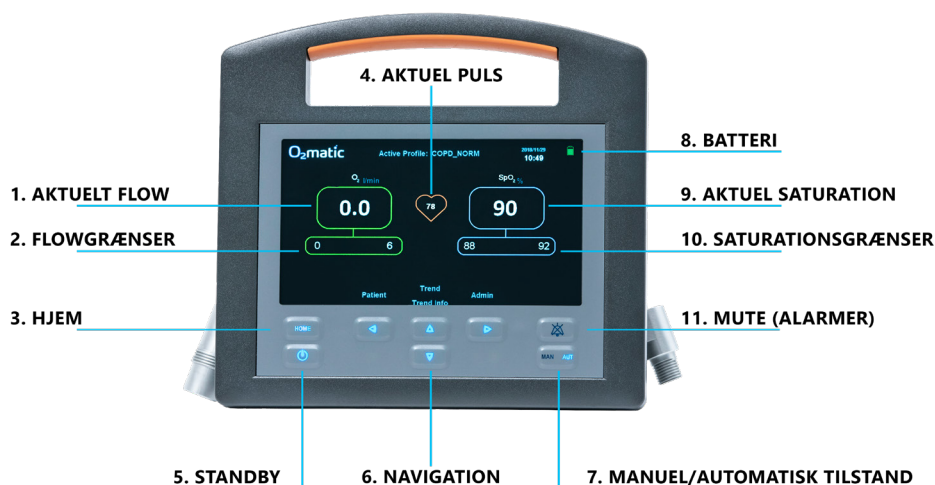

Gældende til O2matic OMC PC-100 & PRO 100 med software version 1.6.2

## Tilslutte ny patient

1. Tænd O2matic ved at holde standby knappen inde i 2 sekunder.
2. Sæt Nonin pulsoximeteret på patientens finger.
2. Påfør maske eller nasalkateter på patienten.

**OBS:** Vær sikker på at kontakten bag på apparatet er tændt. O2matic starter med senest anvendte indstillinger!



## Se patientstatistik

Tryk "Trend info" for at se gennemsnit for seneste 24 timer.

Tryk "Trend" for at se graf for sidste time - se figur 1.

Skift tidsinterval på trend grafen med højre og venstre piletaster.

# Ændre patient eller profil

1. Tryk på "Patient".

2. Tag stilling til om profilen er korrekt - se figur 2.

3. Du kan nu vælge:

a) New Patient - Opret en ny patient. Apparatet vil gennemgå alle indstillingerne for opsætningen af en patient og til sidst oprette den.

Vælg op / ned piletasterne for at skifte indstilling og venstre / højre piletasterne for at gå tilbage/videre i oprettelsesprocessen af profilen.

b) Select profile - Skift den valgte behandlingsprofil. Vælg en af de oprettede standard profiler. Nye profiler kan oprettes i Admin menuen.


c) Customize profile - Tilpas den valgte behandlingsprofil til den individuelle patient. Tilføjede ændringer påvirker ikke standard behandlingsprofilerne - Se figur 2.

d) Location - Tilføj en lokationsnote f.eks. "Stue 2" eller "Seng 3" for at gøre det nemt at holde styr på hvor jeres apparat hører til. Noten kan ses nedst til venstre

## OBS:

Du kan altid vende tilbage til hjem skærmen ved at trykke "HOME".

Du kan mute alarmen i 2 minutter ved at trykke på Mute knappen.

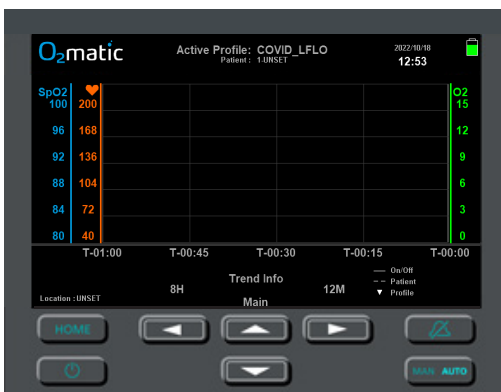

## PROFIL

## VELEGNET TIL

COVID_LFLOW	
<b>SpO2:</b> 92 - 96%	Covid-19 og alm. næsekateter.
<b>Flow:</b> 0 - 8 l/min	Opsætning følger WHO's anbefalinger.

COVID_HFLOW	
<b>SpO2:</b> 92 - 96%	Covid-19 og high flow næsekateter.
<b>Flow:</b> 0 - 15 l/min	Opsætning følger WHO's anbefalinger.

COPD_NORM	
<b>SpO2:</b> 88 - 92%	KOL og alm. næsekateter. Ved ilt sensitiv patient bør iltflow sættes individuelt til f.eks. 0 – 3 l/min.
<b>Flow:</b> 0 - 6 l/min	Opsætning følger BTS og GOLD guidelines.

ASTHM_PNEU	
<b>SpO2:</b> 94 - 98%	Patienter med astma eller tilstande med akut åndedrætssvigt.
<b>Flow:</b> 0 - 10 l/min	Opsætning følger BTS guidelines.

WALKING	
<b>SpO2:</b> 90 - 94%	6 minutters gangtest samt andre mobilitetstest. O2matic PRO 100 bør i dette tilfælde sættes fast på en rollator. Justere iltflow hurtigere.
<b>Flow:</b> 0 - 15 l/min	



### Forsigtighed

Max flow til ilt-sensitive patienter bør vurderes individuelt.