



Opsætning

1. Tilslut strømkabel.
 2. Tilslut ilt.
 3. Tænd O2matic PRO 100 ved at holde standby knappen inde i 2 sekunder.
 4. Tilslut maske eller nasalkateter, og påfør på patienten.
 5. Sæt Nonin pulsoximeteret på patientens finger (eller øre ved brug af øreklips)
 6. Vælg behandlingsprofil og kontroller grænser for SpO2 og O2.
- OBS:** Vær sikker på at kontakten bag på apparatet er tændt.



Forsigtighed

Max flow til ilt sensitive patienter bør vurderes individuelt.

Ændre patient eller profil

1. Tryk på "Patient" fra hovedmenuen. Du kan nu vælge:

a) New Patient - Opret en ny patient. Apparatet vil gennemgå alle indstillingerne for opsætningen af en patient og til sidst oprette den. Vælg op / ned piletasterne for at skifte indstilling og venstre / højre piletasterne for at gå tilbage/videre i oprettelsesprocessen af profilen og til sidst starte behandlingen med den ønskede profil.

b) Select profile - Skift den valgte behandlingsprofil. Vælg en af de oprettede standardprofiler. Nye profiler kan oprettes i Admin menuen.

c) Customize profile - Tilpas den valgte behandlingsprofil til den individuelle patient. Tilføjede ændringer påvirker ikke standard behandlingsprofilerne

d) Location - Tilføj en lokationsnote f.eks. "Stue 2" eller "Seng 3" for at gøre det nemt at holde styr på hvor jeres apparat hører til. Noten kan ses nederst til venstre.

PROFIL

VELEGNET TIL

COVID_LFLOW	
SpO2: 92 - 96%	Covid-19 og alm. næsekateter. Opsætning følger WHO's anbefalinger.
Flow: 0 - 8 l/min	
COVID_HFLOW	
SpO2: 92 - 96%	Covid-19 og high flow næsekateter. Opsætning følger WHO's anbefalinger.
Flow: 0 - 15 l/min	
COPD_NORM	
SpO2: 88 - 92%	KOL og alm. næsekateter. Ved iltfølsom patient bør iltflow sættes individuelt til f.eks. 0 - 3 l/min. Opsætning følger BTS og GOLD guidelines.
Flow: 0 - 6 l/min	
ASTHM_PNEU	
SpO2: 94 - 98%	Patienter med astma eller tilstande med akut åndedrætssvigt.
Flow: 0 - 10 l/min	
WALKING	
SpO2: 90 - 94%	6 minutters gangtest samt andre mobilitetstest. Bør i dette tilfælde sættes fast på en rollator og køre i batteritilstand. Justere iltflow hurtigere.
Flow: 0 - 15 l/min	