



## Opsætning

1. Tilslut strømkabel.
2. Tilslut ilt.
3. Tænd O2matic PRO 100 ved at holde standby knappen inde i 2 sekunder.
4. Tilslut maske eller nasalkateter, og påfør på patienten.
5. Sæt Nonin pulsoximeteret på patientens finger (eller øre ved brug af øreklips)
6. Vælg behandlingsprofil og kontroller grænser for SpO<sub>2</sub> og O<sub>2</sub>.

**OBS:** Vær sikker på at kontakten bag på apparatet er tændt.



### Forsigtighed

Max flow til ilt sensitive patienter bør vurderes individuelt.

## Ændre patient eller profil

1. Tryk på "Patient" fra hovedmenuen. Du kan nu vælge:

**a) New Patient** - Opret en ny patient. Apparatet vil gennemgå alle indstillingerne for opsætningen af en patient og til sidst oprette den. Vælg op / ned piletasterne for at skifte indstilling og venstre / højre piletasterne for at gå tilbage/videre i oprettelsesprocessen af profilen og til sidst starte behandlingen med den ønskede profil.

**b) Select profile** - Skift den valgte behandlingsprofil. Vælg en af de oprettede standard-profiler. Nye profiler kan oprettes i Admin menuen.

**c) Customize profile** - Tilpas den valgte behandlingsprofil til den individuelle patient. Tilføjede ændringer påvirker ikke standard behandlingsprofilerne

**d) Location** - Tilføj en lokationsnote f.eks. "Stue 2" eller "Seng 3" for at gøre det nemt at holde styr på hvor jeres apparat hører til. Noten kan ses nederst til venstre.

### PROFIL

### VELEGNET TIL

SpO2:	
Flow:	
SpO2:	
Flow:	
SpO2:	
Flow	
SpO2:	
Flow:	
<b>WALKING</b>	
SpO2: 90 - 94%	6 minutters gangtest samt andre mobilitetstest. Bør i dette tilfælde sættes fast på en rollator og køre i batteritilstand. Justere iltflow hurtigere.
Flow: 0 - 15 l/min	