


O2MATIC QUICK GUIDE

Kom hurtigt i gang med O2matic

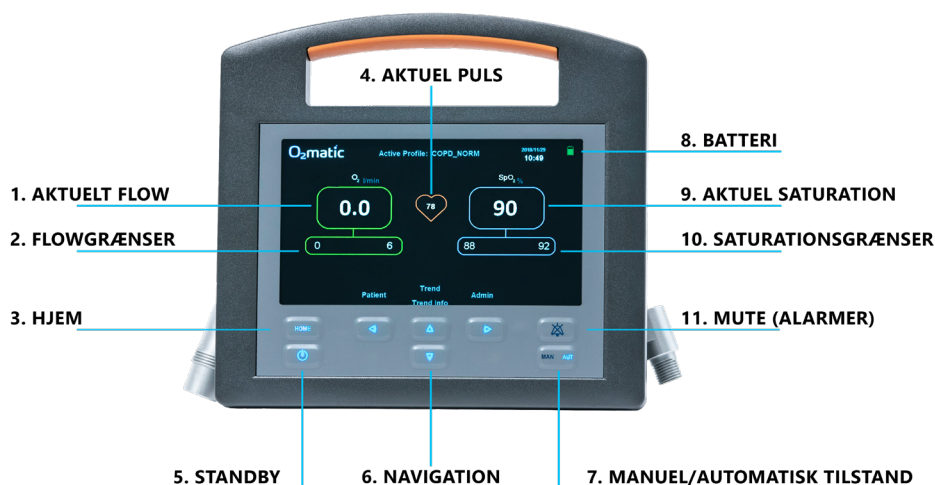

Gældende til PRO 100 med
software version 1.7.0 og firmware version 1.26

Tilslutte ny patient

1. Tænd O2matic ved at holde standby knappen inde i 2 sekunder.
2. Sæt Nonin pulsoximeteret på patientens finger.
2. Påfør maske eller nasalkateter på patienten.

OBS: Vær sikker på at kontakten bag på apparatet er tændt. O2matic starter med senest anvendte indstillinger!



Se patientstatistik

Tryk "Trend info" for at se gennemsnit for seneste 24 timer.

Tryk "Trend" for at se graf for sidste time - se figur 1.

Skift tidsinterval på trend grafen med højre og venstre piletaster.

Ændre patient eller profil

1. Tryk på "Patient".

2. Tag stilling til om profilen er korrekt - se figur 2.

3. Du kan nu vælge:

a) New Patient - Opret en ny patient. Apparatet vil gennemgå alle indstillingerne for opsætningen af en patient og til sidst oprette den.

Vælg op / ned piletasterne for at skifte indstilling og venstre / højre piletasterne for at gå tilbage/videre i oprettelsesprocessen af profilen.

b) Select profile - Skift den valgte behandlingsprofil. Vælg en af de oprettede standard profiler. Nye profiler kan oprettes i Admin menuen.

c) Customize profile - Tilpas den valgte behandlingsprofil til den individuelle patient. Tilføjede ændringer påvirker ikke standard behandlingsprofilerne - Se figur 2.

d) Location - Tilføj en lokationsnote f.eks. "Stue 2" eller "Seng 3" for at gøre det nemt at holde styr på hvor jeres apparat hører til. Noten kan ses nedst til venstre

OBS: Du kan altid vende tilbage til hjem skærmen ved at trykke "HOME".

Du kan mute alarmer i 2 minutter ved at trykke på Mute knappen. En indikator nederst til højre på hjem skærmen viser hvor lang tid apparatet er muted.

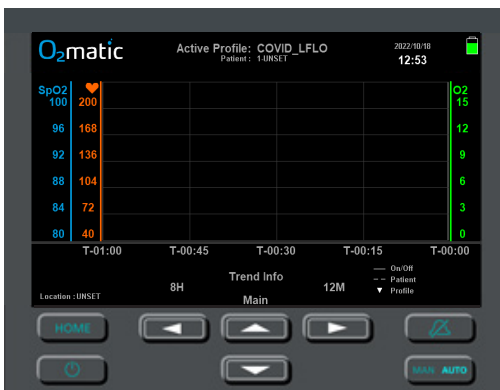


Figure 1 - Trend oversigt



Figure 2 - Customize profile

PROFIL

VELEGNET TIL

COPD	
SpO2: 88 - 92%	KOL og alm. næsekateter. Ved ilt sensitiv patient bør iltflow sættes individuelt til f.eks. 0 – 3 l/min. Opsætning følger BTS og GOLD guidelines.
Flow: 0 - 6 l/min	

HYPOXEMIA	
SpO2: 94 - 98%	Patienter med astma eller tilstande med akut åndedrætssvigt. Opsætning følger BTS og GOLD guidelines.
Flow: 0 - 15 l/min	

ACTIVITY	
SpO2: 90 - 94%	Bruges ved aktivitet f.eks. 6 minutters gangtest samt andre mobilitetstest. O2matic PRO 100 bør i dette tilfælde sættes fast på en rollator eller lign. Justere iltflow hurtigere.
Flow: 0 - 15 l/min	

Forsigtighed

Max flow til ilt-sensitive patienter bør vurderes individuelt.



Oximeter signal alarm delay indstillingen bør vurderes individuelt. Forsinkelsen kan indstilles til 0 - 5 min eller 0 - 30 min hvis dit apparat har 1.26 firmware opdateringen (Tjek admin menu).
Ilt flow forbliver det samme hvis signalet til sensoren bliver afbrudt.

Noter