



Opsætning

1. Tilslut strømkabel.
 2. Tilslut ilt.
 3. Tænd O2matic PRO 100 ved at holde standby knappen inde i 2 sekunder.
 4. Tilslut maske eller nasalkateter, og påfør på patienten.
 5. Sæt Nonin pulsoximeteret på patientens finger (eller øre ved brug af øreklips)
 6. Vælg behandlingsprofil og kontroller grænser for SpO2 og O2.
- OBS:** Vær sikker på at kontakten bag på apparatet er tændt.

